

Guía de referencia rápida

Autoinyector Skytrofa®

Para cartuchos SKYTROFA



Uso en un solo paciente

Ver video



www.skytrofa.com




Esta es su Guía de referencia rápida.

- Lea las Instrucciones de uso para ver las instrucciones completas antes de utilizar esta Guía de referencia rápida.
- Para ver el video de capacitación, vaya a www.skytrofa.com.
- Si no está seguro de la dosis, póngase en contacto con su proveedor de atención médica.



Instrucciones
de uso

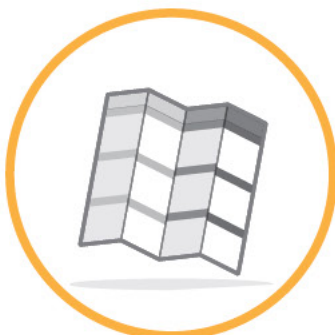

Guía de
referencia rápida



www.skytrofa.com

Video de
capacitación

Servicio de atención al cliente de Ascendis Pharma



1 844-44ASCENDIS
(1-844-442-7236)

Descripción general de las partes

Parte superior verde

Comienza la inyección cuando se presiona contra la piel

Ventana de inspección

Permite la inspección de la mezcla del medicamento

Barra de progreso (con seis elementos luminosos)

Muestra el progreso de la mezcla y la inyección

Íconos de estado



Marca de verificación verde

Inyección completada con éxito



Ojo verde

La mezcla del medicamento está lista para su inspección en la ventana



Mezcla verde

La mezcla del medicamento está en curso

Botón verde

Encender el autoinyector SKYTROFA o rechazar la mezcla del medicamento

Aguja

Atornillar al cartucho SKYTROFA antes de insertar el cartucho en la parte superior verde

Tapón naranja

Lea más en la página 28.

Cartucho SKYTROFA

Contiene el medicamento y agua para la inyección. Si está refrigerado, déjelo a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de usarlo

Ícono de batería



Luz verde sin titilar

- ➔ La batería está totalmente cargada
- ➔ El autoinyector SKYTROFA está listo para su uso




Luz verde intermitente

- ➔ Queda al menos 1 inyección, pero se recomienda recargar después de usarlo



Luz naranja intermitente

- ➔ La batería necesita recarga

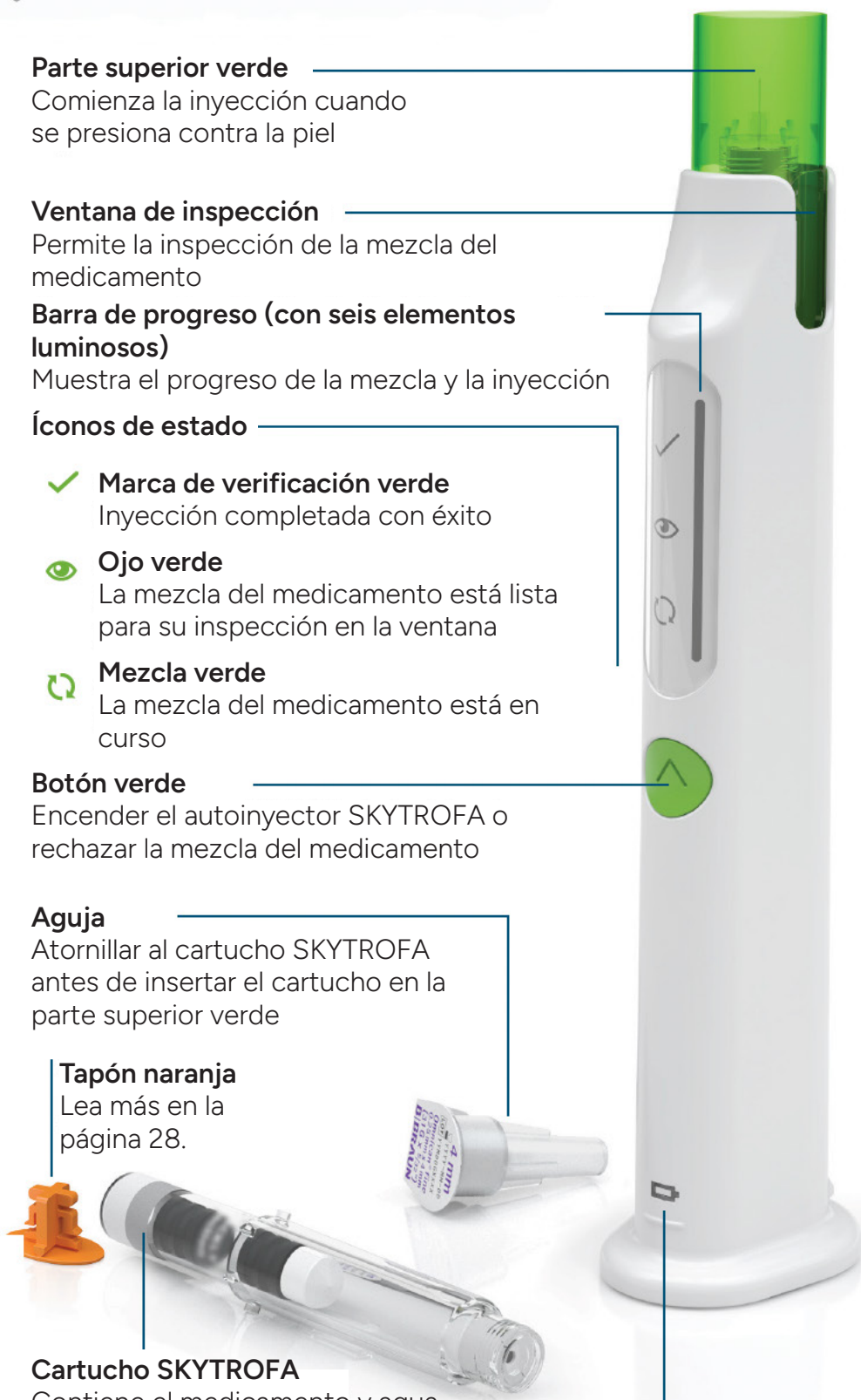

Preparación

1

Revise y ensamble el cartucho y la aguja

1.1

Compruebe la fecha de vencimiento y la dosis del cartucho en el paquete de cartuchos. Si está refrigerado, deje que pasen **15 minutos** hasta que alcance la temperatura ambiente.

Fecha de vencimiento
AAAA - MM
año mes

Dosis del cartucho



1.2

Compruebe la fecha de vencimiento de la aguja.

Fecha de vencimiento
AAAA - MM - DD
año mes día

Retire el papel de la aguja.



1.3


Enrosque la aguja de modo que quede recta y bien ajustada al cartucho. **No** quite el capuchón de la aguja.



2

Encienda el autoinyector

Pulse y suelte el botón verde para encender el autoinyector.

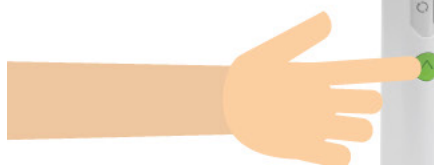

(Oirá **2** pitidos fuertes. El ícono de batería  se iluminará y la parte superior verde comenzará a parpadear).


3

Inserte el cartucho con la aguja acoplada

3.1

Aguja
Cartucho

Empuje el cartucho **con la aguja acoplada** en la parte superior verde que está parpadeando.

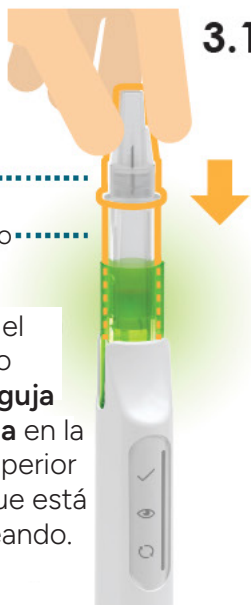

3.2

Empuje el cartucho hasta que haga clic. (La parte superior verde dejará de parpadear, el ícono de mezcla  se iluminará y se apagará el ícono de batería)



3.3

Después de que haga clic, retire el dedo del cartucho.



Mezcla

4

Espere mientras se mezcla

Espere de 4 a 8 minutos hasta que el autoinyector mezcle el medicamento.

Observe cómo la barra de progreso se ilumina gradualmente.

Espere de 4 a 8 minutos




Espere hasta oír 2 pitidos fuertes y a que parpadee toda la barra de progreso.

Si su autoinyector se apaga automáticamente, lea las Instrucciones de uso IFU en la página 60.

5

Gire el autoinyector hacia arriba y hacia abajo

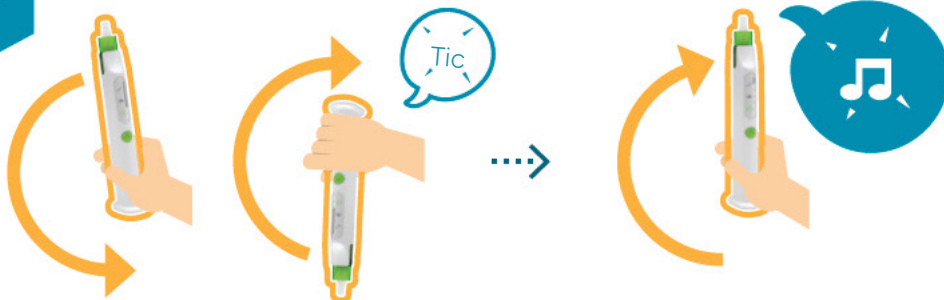

Gire el autoinyector hacia arriba y hacia abajo, **prestando atención** al sonido de un clic en cada ciclo ascendente y descendente para asegurarse de que los giros son correctos. **Gire hacia arriba y hacia abajo correctamente** entre 5 y 10 veces hasta que oiga **2 pitidos fuertes** y se ilumine toda la barra de progreso, excepto el elemento superior.

No pulse el botón verde.

Si ve un ícono de mezcla parpadeando en naranja, lea IFU en la página 58.

6

Finalización de la mezcla

Mantenga el autoinyector en posición vertical sobre una superficie plana hasta que oiga 2 pitidos fuertes y se encienda toda la barra de progreso.



6.1

Retire el capuchón de la aguja.

No gire el capuchón de la aguja.

Guarde el capuchón de la aguja para después.

(El ícono del ojo  se iluminará).



6.2

Inyección

7

Compruebe la mezcla del medicamento

Se puede usar el medicamento si es incoloro y transparente. Puede contener burbujas de aire. Esto es normal. Vaya al Paso 8.

No utilice la mezcla del medicamento si tiene partículas visibles. Pulse el botón verde durante **8** segundos y vaya al Paso 10.




8

Preparación para la inyección

8.1

Elija un lugar de inyección: Estómago (abdomen), muslos o nalgas. Cambie el lugar de aplicación en cada inyección.

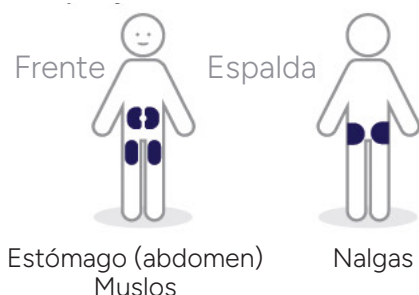


8.2

Asegúrese de que sus manos estén limpias usando agua y jabón o desinfectante de manos.



8.3

Limpie el lugar de la inyección con una toallita con alcohol. **No se** inyecte a través de la ropa.

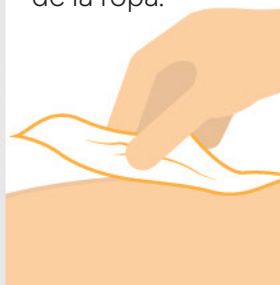

9

Inyección del medicamento

9.1

Mantenga pulsada la parte superior verde contra el lugar de la inyección durante **10 a 20** segundos hasta que oiga **2** pitidos fuertes.

(La parte superior verde parpadeará **2** veces y el ícono de marca de verificación  se iluminará).



9.2

Retire el autoinyector de la piel y espere hasta oír **2** pitidos fuertes.

(La parte superior verde dejará de parpadear)




Después de la inyección

10

Extracción del cartucho

Presione el capuchón de la aguja hacia abajo contra la parte superior verde parpadeante hasta que **oiga** un clic para extraer el cartucho.

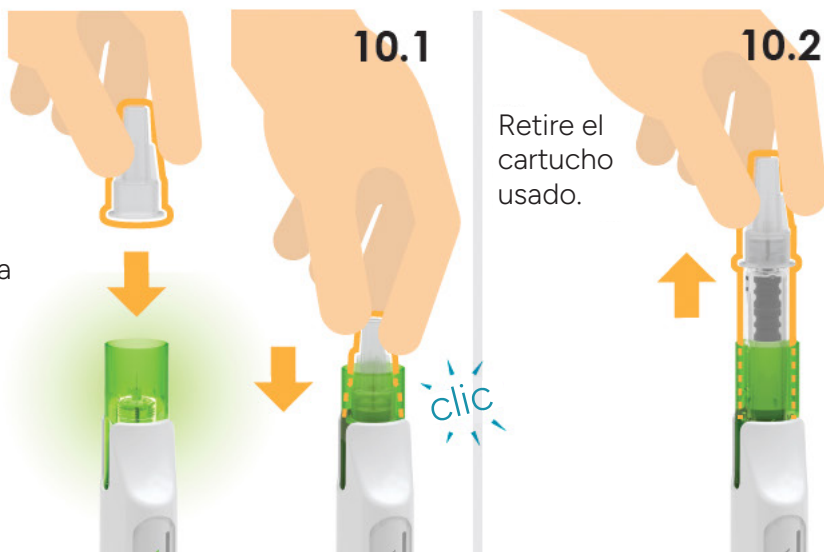


11

Compruebe el cartucho y deséchelo

Compruebe que el cartucho esté vacío.

Coloque la aguja y el cartucho usados en un recipiente para objetos punzocortantes.

(Más información:
➡ IFU página 46)

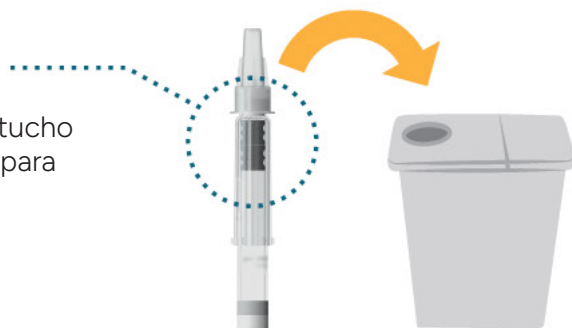

¿Su dosis semanal requiere el uso de 2 cartuchos?


A continuación, aplique la segunda inyección repitiendo los Pasos 1 a 11 con una aguja y un cartucho nuevos antes de ir al Paso 12.

12

Almacenamiento del autoinyector

Coloque la cubierta protectora.

Se recomienda guardar el autoinyector a temperatura ambiente, entre 59 °F y 86 °F (15 °C y 30 °C) para que esté listo para su siguiente uso.

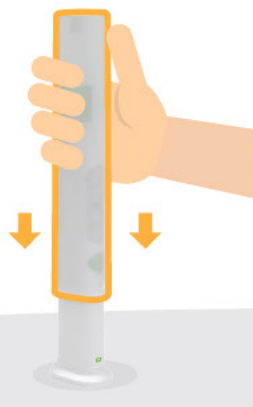


Solución rápida de problemas

Para todos los casos y detalles relacionados con la resolución de problemas, consulte las Instrucciones de uso (Instructions for Use, IFU).

► IFU, página 52

Necesita recarga (Paso 2)

► IFU, página 57

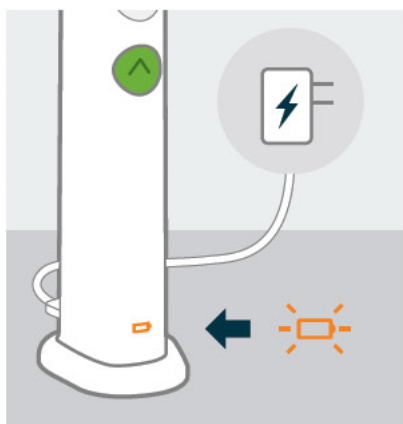

Si el nivel de batería es bajo:




Verá un ícono de batería parpadeando en naranja.

Haga lo siguiente: Inserte el cable de carga en el autoinyector SKYTROFA en la parte inferior trasera y conéctelo a una toma de corriente.

El autoinyector SKYTROFA no está en posición vertical (Pasos 4 y 6.1)

► IFU, página 54

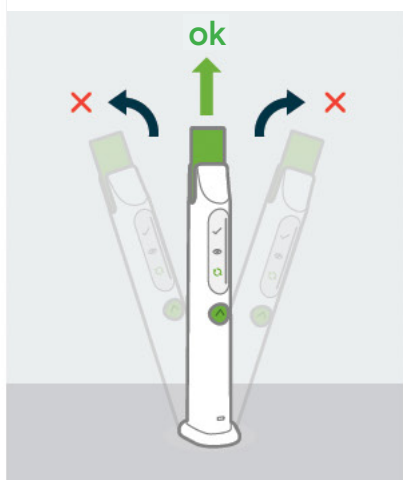

Si el autoinyector SKYTROFA no está en posición vertical durante la mezcla y la eliminación del aire:




Oirá un sonido repetitivo de notificación. El ícono de mezcla parpadeará despacio y la barra de progreso se congelará.

Haga lo siguiente: Coloque el autoinyector SKYTROFA en posición vertical y la mezcla o la eliminación de aire continuarán.

Pérdida de contacto con la piel (Paso 9)

► IFU, página 55

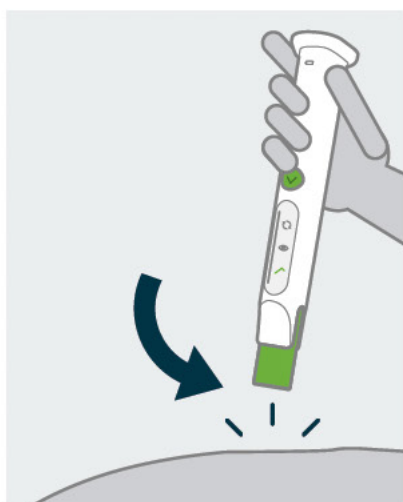

Si se retira la parte superior verde de la piel antes de completar la inyección:



Oirá un sonido repetitivo de notificación. El ícono de marca de verificación parpadeará despacio y la barra de progreso se congelará.

Haga lo siguiente: Presione la parte superior verde contra la piel y continuará la aplicación de la inyección.