Guía de Referencia Rápida



Para cartuchos SKYTROFA

Uso para un solo paciente





Esta es su **Guía de referencia rápida**

- Para ver las instrucciones completas, lea las instrucciones de uso
- Para ver el video de capacitación, visite www.skytrofa.com
- Si no está seguro sobre su dosis, comuníquese con su profesional de la salud



Instrucciones de uso



Guía de referencia rápida



Video de capacitación

Servicio de Atención al Cliente de Ascendis Pharma



1-844-44ASCENDIS

(1-844-442-7236)

Descripción general de las piezas

Parte superior verde

Inicia la invección cuando se presiona contra la piel

Ventana de inspección

Permite inspeccionar la mezcla del medicamento

Barra de progreso

Muestra el progreso de la mezcla y la inyección

Íconos de estado

- Marca de verificación verde La invección se completó con éxito
- Ojo verde El medicamento mezclado está listo para inspeccionarse por la ventana
- Mezcla verde La mezcla del medicamento está en

Botón verde

Para encender el Autoinyector SKYTROFA o para rechazar el medicamento mezclado

Aguja



y agua para la invección

Ícono de batería



Verde constante

- → La batería está completamente caraada
- está listo para usarse



Verde parpadeante

Queda al menos 1 inyección, pero se → El Autoinvector SKYTROFA recomienda caraarlo después de usarse



Rojo parpadeante

→ La batería necesita caraarse

Preparación

1.1

Revise y monte el cartucho y la aguja

Revise la fecha de vencimiento y la dosis del cartucho en el envase.



Revise la fecha de vencimiento en la aguja.

Fecha de vencimiento

AAAA - MM_ - DD


Retire el

papel de la aguja. Enrosque la aguja en forma recta y con firmeza en el cartucho. **No** retire la

1.3

No retire la tapa de la aguja.

2 Encienda el autoinyector

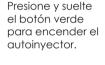



(Se oirán 2 pitidos fuertes. El ícono de batería se iluminará y la parte superior verde empezará a parpadear).

3 Inserte el cartucho



Encaje el cartucho hasta escuchar un clic.

verde dejará de parpadear, el ícono de mezcla se iluminará y el ícono de batería se apagará.

Después de escuchar el clic, retire el

dedo del

cartucho.

Mezcla

Espere mientras se mezcla

Espere de 4 a 8 minutos para que el autoinyector mezcle el medicamento.

Observe cómo se ilumina gradualmente la barra de progreso.





Espere hasta que oiga **2** pitidos fuertes y toda la barra de progreso parpadee.

Gire el autoinyector hacia arriba y hacia abajo

Gire el autoinyector hacia arriba y hacia abajo. Un sonido de tic confirma que los giros son correctos. Gire de 5 a 10 veces hasta que oiga 2 pitidos fuertes y la barra de progreso, excepto el elemento superior, se ilumine.

No presione el botón verde.



Termine de mezclar

Mantenga en posición vertical hasta que oiga **2** pitidos fuertes y se ilumine toda la barra de progreso.

6



Retire la tapa de la aguja.

No gire.

Guarde la tapa de la aguja para su uso posterior.

(El ícono del ojo se iluminará) 6.2

Inyección

(7)

Revise el medicamento mezclado

El medicamento puede utilizarse si es incoloro y transparente (está bien que haya algunas burbujas de aire). Vava al paso 8.

No utilice el medicamento mezclado si tiene partículas visibles. Presione el botón verde durante 3 seaundos v vava al paso 10.



Prepárese para la inyección

Elija un lugar para la inyección: Estómago (abdomen), muslos o nalgas. Cambie de lugar para cada invección.



Estómago (abdomen) Muslos Nalgas Lávese las manos.

8.2



83 Limpie el lugar de la inyección

con una toallita con alcohol. No se invecte

a través de la ropa.



Inyéctese el medicamento

8.1

Mantenga presionada la parte superior verde contra el lugar de la inyección durante 10 a 15 segundos, hasta que oiga 2 pitidos fuertes.

(La parte superior verde parpadeará 2 veces v el ícono de marca de verificación ✓ se iluminará).

9.1

Retire el autoinvector de la piel y espere hasta que oiga 2 pitidos fuertes.

(La parte superior verde empezará a parpadear).



Después de la inyección

Retire el cartucho

Coloque la tapa de la aguja en la parte superior verde parpadeante.



1

Revise el cartucho y deséchelo

Compruebe que el cartucho está vacío.

Coloque el cartucho y la aguja usados en un contenedor de eliminación de objetos punzantes.

(Más información: Consulte las instrucciones de uso; página 34).





¿Su dosis semanal requiere 2 cartuchos?

Entonces, aplíquese la segunda inyección repitiendo los pasos 1 al 11 con un nuevo cartucho y aguja antes de continuar con el paso 12.

12

Guarde el autoinyector

Ponga la tapa protectora.

Guárdelo a temperatura ambiente entre 59°F y 86°F (15°C y 30°C), para que esté listo para su próximo uso.



Solución rápida de problemas

Para obtener información más detallada, consulte las instrucciones de uso.

El dispositivo debe cargarse (paso 2)

■ Instrucciones de uso página 47



Si el nivel de la batería es bajo:

Se verá un ícono de batería que parpadea en rojo.

Haga lo siguiente: Inserte el cable del cargador en el Autoinyector SKYTROFA por la parte inferior trasera y conéctelo a una toma de corriente.

El Autoinyector SKYTROFA no está en posición vertical (pasos 4 y 6.1)

Instrucciones de uso página 44




Si el Autoinyector SKYTROFA no está en posición vertical durante la mezcla y la extracción de aire:

Se oirá un sonido de advertencia que se repite. El ícono de mezcla parpadeará lentamente y la barra de progreso se congelará.

> Haga lo siguiente: Coloque el Autoinyector SKYTROFA en posición vertical y la mezcla o la extracción de aire continuarán.

Pérdida de contacto con la piel (paso 9)

■ Instrucciones de uso página 45

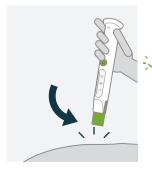

Si la parte superior verde se retira de la piel antes de que se complete la inyección:

Se oirá un sonido de advertencia que se repite. El ícono de marca de verificación parpadeará lentamente y la barra de progreso se congelará.

Haga lo siguiente: Presione la parte superior verde contra la piel y la inyección continuará.